

機械器具74 医薬品注入器
JMDN コード: 44035000 容器アダプタ
一般医療機器
コレクション シリンジアダプタ


再使用禁止

【禁忌・禁止】
<使用方法>
・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

本品は、シリンジ内の体液・薬液を容器に注入する際、ポートに嵌合させるための器具である。
本品はエチレンオキシド滅菌済みである。

<形状>

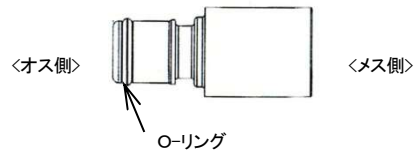

<原材料>本体:ポリスルフォン

【使用目的又は効果】

本品は、シリンジと容器の接続に使用するアダプタで両者の嵌合に用いる。

【使用方法等】

1. 本品は、包装開封後そのまま直ちに使用すること。
2. 容器に付いているキャップを外し、オス側部分を嵌合させる。嵌合部は手で触れない。
3. シリンジに付けていたキャップを外し、メス部分に嵌合させる。嵌合部は手で触れない。
4. シリンジから内容物を容器に注入する。
5. 注入が終了したら、アダプタを外し容器にキャップを施す。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 包装開封後、直ちに使用すること。
2. 使用中の嵌合緩みに注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて室温で保管すること。
2. 使用期限は包装に記載（自己認証による）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者:
サイトリ・セラピューティクス株式会社
〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目3番3号
FDC 麹町ビル
電話番号:03-6261-9072

**製造業者:
Viant San Antonio, Inc.
米国

