

機械器具74 医薬品注入器
JMDN コード: 35384000 注射筒・針用アダプタ
一般医療機器
シリンジ ルアーロックアダプタ

【形状・構造及び原理等】

本品は、注射筒とカニューレ等を接続し使用する器具である。
本品は再使用可能である。

〈形状〉



〈原材料〉ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、注射筒又はカニューレ等を接続するのに用いる。

【使用方法等】

1. 使用後は、本品に異常が無いことを確認し、感染防止のため血液・体液・薬品等の付着物が乾燥しないうちに洗浄を行うこと。
2. 洗浄・滅菌後は適切に保管すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品をクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、またはその疑いのある患者に使用した場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)に関する国内規制及びガイドライン等を遵守すること。
2. 過剰な力を加える等無理な使用は避けること。

〈その他注意〉

1. 本品に適合した形状の器具を併用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 次の使用まで汚染等に応じ清潔・乾燥が保てる場所に保管すること。
2. 滅菌して保管する場合、滅菌有効期限の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

〈洗浄〉

1. 使用後直ちに洗浄し、洗浄時は手袋を着用すること。
2. 酵素系の洗剤の使用を推奨する。
3. 酵素洗剤に本品を 5 分以上浸漬させる。
4. ブラシ等を使用し内部までこすり洗いし汚れを取り去る。汚れがひどい場合は、中性洗剤に漬けてから作業を繰り返すことを推奨する。
5. 本品を超音波洗浄槽に浸漬し 10 分以上洗浄する。
6. 本品を浸透した脱イオン水で綺麗になるまでシリンジ等でフラッシュしながらすすぐ。
7. 本品を乾燥させセーム布等で拭く。清浄なエアーを使用し適切に吹きかける。

〈消毒、滅菌〉

1. 滅菌前に本品を充分洗浄すること。
2. 滅菌条件は 134℃/4 分間を推奨する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者:
サイトリ・セラピューティクス株式会社
〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目 3 番 3 号
FDC 麹町ビル
電話番号:03-6261-9072

製造業者:
*Cytori Therapeutics, Inc.
米国

